



The Code of Excellence



**Relazione sui risultati dei trattamenti
*Monnalisa Touch*TM eseguiti a San Marino**

MonnaLisa TouchTM



Relazione sui risultati dei trattamenti Monnalisa Touch™ eseguiti a San Marino

Dr. M. Filippini - Dr.ssa Miriam Farinelli (San Marino)

L'innovativa tecnologia laser, che riduce i disturbi legati alla menopausa, ha migliorato la qualità della vita delle pazienti, riducendo nell'88% dei casi trattati il dolore durante i rapporti sessuali.

E' quanto risulta dai risultati clinici ottenuti dai primi 120 casi trattati dall'UOC di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino con la nuova tecnologia **MonnaLisa Touch™**, messa a punto dalla DEKA, azienda leader nella progettazione e nella produzione di laser e sistemi di luce per applicazioni in campo medicale.

I dati sono stati presentati in occasione del convegno medico "Nuova tecnologia laser per il ginecologo" organizzato da DEKA all'Hotel San Giuseppe nella Repubblica di San Marino.

La UOC di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino ha eseguito trattamenti laser **MonnaLisa Touch™** dalla fine del mese di gennaio 2013.

A tutte le pazienti è stata proposta una sola applicazione laser, riservandosi di valutare durante la visita di controllo, l'eventuale necessità di ripetere la metodica in caso di persistenza o scarsa risposta al sintomo dichiarato inizialmente.

Tutte le pazienti hanno eseguito un breve periodo di astinenza da rapporti sessuali, evitato bagni in acqua, esercizi fisici, ed applicato per circa 15-20 giorni, alla sera, un gel idratante sia in vagina che sulla vulva od introito in caso di loro trattamento concomitante.

L'età delle pazienti trattate è stata:

- nel 62% dei casi fra i 51 e i 60 anni,
- nel 18% fra i 61 e i 70 anni,
- nel 10% fra i 46 e i 50 anni,
- nel 9% dei casi le pazienti presentavano un'età minore a 45 anni,
- nel 3% un'età superiore ai 70 anni.

L'84% delle donne trattate erano in menopausa fisiologica o indotta da chemioterapia.

Tra le 120 pazienti trattate, 18 di esse (pari al 15%) aveva sintomi da menopausa indotta avendo eseguito una chemio e/o radioterapia per il trattamento di un tumore (per il 78% si trattava di un tumore mammario).

Nessuna delle pazienti trattate presentava una positività citologica colpo-vulvo-vaginale, mentre nel 31% dei casi (37 pazienti), prima del trattamento, si è resa necessaria una terapia locale con antibiotici per la positività al tampone vaginale.

Il 43% delle pazienti non ha manifestato alcun sintomo durante il trattamento laser vaginale, mentre il 57%, quando si rendeva necessario il trattamento sia dell'introito che della mucosa vulvare, ha accusato lievi disturbi che andavano dal fastidio e dolore durante il movimento del dispositivo laser, fino al calore e bruciore a livello dell'introito e dell'area vulvare, tutti sintomi comunque di lieve entità e che non hanno interrotto la procedura in atto.

La quasi totalità delle donne ha dichiarato di avere avuto un miglioramento della secchezza vaginale. Solo 5 pazienti hanno confermato la stessa sintomatologia che aveva prima del trattamento, evidenziando che il trattamento ha risolto nella maggioranza dei casi in modo significativo il problema.

A tutte le pazienti, a circa due mesi dopo l'intervento, durante la visita di controllo, è stato chiesto il grado di soddisfazione del trattamento e l'esito dello stesso.

Solo il 12% delle donne interpellate non è risultata del tutto soddisfatta, o si aspettava molto di più, mentre l'88% delle pazienti ha dichiarato di essere contenta e di avere avuto miglioramenti.

In particolare

- 25,2% si è dichiarata parecchio o molto soddisfatta,
- 18,3% completamente soddisfatta,
- 47,9% moderatamente o abbastanza soddisfatta,
- 10,4% solo niente, poco o appena soddisfatta.

In generale pertanto la riduzione percentuale della sintomatologia, a due mesi dopo una sola applicazione della metodica laser, è stata

- del 59,33% per quanto riguarda il bruciore,
- del 51,94% per quanto riguarda la secchezza,
- del 48,16% per quanto riguarda la dispareunia,
- del 52,10% per quanto riguarda il prurito,
- del 86,15% per quanto riguarda il calore,
- del 68,31% per quanto riguarda il dolore vaginale,
- del 51,85% per quanto riguarda il dolore vulvare.

Molti sono stati i commenti positivi, se non entusiastici, da parte delle pazienti dopo il trattamento.

Alcuni dei più significativi:

- “Non ci posso credere di stare bene...”
- “Molto contenta, non credevo di migliorare così tanto...”
- “Molto soddisfatta, non uso più lubrificanti...”
- “Contentissima, mi sento assolutamente normale come prima...”
- “Vi farò una grandissima pubblicità, sono molto contenta...”
- “La cosa che non mi aspettavo è che è migliorato anche il desiderio ...”
- “Non credevo facesse un miracolo del genere, lo rifarei sicuramente...”
- “Ti dà un'altra chance, vagina molto piu' umida, sono tornata come prima”.



The Code of Excellence

www.dekalaser.com

DEKA M.E.L.A. s.r.l.

Via Baldanzese,17 - 50041 Calenzano (FI) - Italia
Tel. 055 8874942 - Fax 055 8832884